

# Manuale d'Uso e Manutenzione

## Sacchi salma



**STX 700 ST00700A**



**STX 702 ST00702A**



**STX 703 ST00703A**



**STX 705 ST00705A**

Sistema di Garanzia di Qualità per la produzione ed il controllo finale dei prodotti certificato dall'organismo notificato TÜV Italia Srl.

### INDICE

<b>Informazioni Generali</b>	<b>pag. 2</b>	<b>Istruzioni Operative</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Avvertenze</b>	<b>pag. 2</b>	<b>Manutenzione e Pulizia</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Descrizione del prodotto</b>	<b>pag. 2</b>		

# Grazie per aver scelto un prodotto Spencer

## 1 INFORMAZIONI GENERALI

### 1.1 SCOPO E CONTENUTO

Questo manuale ha lo scopo di fornire al Cliente tutte le informazioni necessarie affinché, oltre ad un adeguato utilizzo del dispositivo, sia in grado di gestire lo strumento nel modo più autonomo e sicuro possibile. Esso comprende informazioni inerenti l'aspetto Tecnico, il Funzionamento, la Manutenzione, i Ricambi e la Sicurezza.

### 1.2 CONSERVAZIONE DEL MANUALE D'USO

Il Manuale d'uso e manutenzione deve essere conservato nelle vicinanze del prodotto, dentro un apposito contenitore e, soprattutto, al riparo da qualsiasi elemento o sostanza che ne possa compromettere la perfetta leggibilità.

### 1.3 SIMBOLI UTILIZZATI

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Vedere istruzioni per l'uso

### 1.4 RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per qualsiasi tipo di informazione relativa alla corretta interpretazione delle istruzioni, all'uso, alla manutenzione, alla installazione, al reso, contattare il Servizio Assistenza Clienti Spencer allo 0039 0521 541111 - Fax 0039 0521 541222 e-mail: info@spencer.it oppure scrivere a Spencer Italia S.r.l. - Strada Cavi, 7 - 43044 Collecchio (Parma) - ITALY.

### 1.5 SMALTIMENTO

Attenersi alle norme vigenti.

### 1.6 TARGHE

Le targhe sono localizzabili sul dispositivo e/o sulla confezione e non devono essere rimosse o coperte. Per agevolare le operazioni di assistenza indicare o comunicare sempre il numero di matricola (SN) o lotto (LOT) riportato sulla targa.

## 2 AVVERTENZE

### 2.1 AVVERTENZE GENERALI

- Prima di effettuare qualsiasi operazione sul dispositivo, gli operatori devono leggere attentamente le istruzioni contenute nella presente pubblicazione, con particolare attenzione riguardo alle opportune precauzioni per la sicurezza ed alle metodologie d'installazione ed impiego.
- In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni, interpellare Spencer Italia S.r.l., per ottenere i necessari chiarimenti.
- Per i modelli che non sono monouso, controllare regolarmente il dispositivo. Effettuare la prescritta manutenzione per mantenerlo in buono stato e per garantirne un funzionamento sicuro e la durata nel tempo.
- In caso di anomalie o danni che possano compromettere la funzionalità e la sicurezza del dispositivo è necessario togliere immediatamente il dispositivo dal servizio.
- Non alterare o modificare arbitrariamente il dispositivo; la modifica potrebbe provocarne il funzionamento imprevedibile e danni ai soccorritori.
- Il dispositivo non deve subire alcuna manomissione, in caso contrario si declina ogni responsabilità sul funzionamento corretto o su eventuali danni provocati dal dispositivo stesso.
- Assicurarsi di aver adottato ogni precauzione al fine di evitare pericoli derivanti dal contatto con sangue o secreti corporei.
- Maneggiare con cura.

### 2.2 AVVERTENZE SPECIFICHE

- Il prodotto deve essere utilizzato solamente da personale addestrato.
- Il dispositivo non deve essere esposto e tantomeno venire in contatto con fonti termiche di combustione ed agenti infiammabili.
- Utilizzare il sacco salma solamente come descritto in questo manuale.
- Verificare sempre l'integrità di tutte le parti del sacco salma prima dell'utilizzo.
- Rispettare la portata massima indicata nel presente manuale.
- Sostituire immediatamente il sacco salma se usurato o danneggiato.
- Il sacco salma deve essere utilizzato da almeno due operatori adeguatamente formati.

### 2.3 CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI

L'utilizzo di questo dispositivo, se effettuato come descritto nel presente manuale d'uso, non presenta particolari controindicazioni od effetti collaterali.

## 3 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### 3.1 DESTINAZIONE D'USO

I sacchi salma Spencer sono dispositivi destinati al recupero salme. L'apertura integrale con chiusura zip facilita le operazioni di recupero. Le maniglie consentono una facile presa da parte degli operatori che effettuano il trasporto della salma.

### 3.2 COMPONENTI PRINCIPALI

1. Telo
2. Maniglie laterali per il trasporto
3. Cerniera con apertura integrale
4. Tasca trasparente in PVC per l'identificativo della salma

### 3.3 MODELLI

- ST00700A STX 700 Sacco salma in nylon bispalmato, sei maniglie
- ST00702A STX 702 Sacco salma in nylon bispalmato, dieci maniglie
- ST00703A STX 703 Sacco salma in TNT spalmato, sei maniglie
- ST00705A STX 705 Sacco salma in TNT spalmato, sei maniglie

### 3.4 DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	STX 700	STX 702	STX 703	STX 705
Lunghezza (mm)	1980	1980	2150	2250
Larghezza (mm)	890	890	1020	800
Peso (kg)	2	2	0,8	0,8
Portata (kg)	150	150	120	120
Materiale	Nylon bispalmato	Nylon bispalmato	TNT spalmato	TNT spalmato
Numero maniglie	6	10	6	6
Riutilizzabile/monouso	Riutilizzabile	Riutilizzabile	Monouso	Monouso

### 3.5 CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di utilizzo: da -5 a +45 °C

Temperatura di stoccaggio: da -10 a +50 °C

Umidità relativa: da 5 a 95%

## 4 | ISTRUZIONI OPERATIVE

### 4.1 TRASPORTO E STOCCAGGIO

Prima di effettuare il trasporto del dispositivo assicurarsi di averlo imballato adeguatamente e di essersi adoperati affinché non sussistano rischi di urti o cadute durante il trasporto stesso.

Conservare l'imballo originale per eventuali successivi trasporti. Danni al dispositivo causati durante il trasporto e la movimentazione non sono coperti da garanzia. Riparazioni o sostituzioni di parti danneggiate sono a carico del Cliente. Lo stoccaggio del dispositivo deve avvenire in luoghi asciutti e privi di umidità.

### 4.2 PREPARAZIONE

Al ricevimento del prodotto:

- rimuovere l'imballo e disporre il materiale in modo visibile
  - controllare tutti i pezzi compresi nella lista di accompagnamento.
- Il dispositivo va controllato prima e dopo ogni utilizzo effettuando le seguenti verifiche:

- Il telo mostra sulla sua superficie tagli, fori, abrasioni?
- I componenti del dispositivo sono integri?
- Le maniglie sono lacerate?

Se tutto è regolare, il dispositivo è pronto per essere utilizzato.

### 4.3 FUNZIONAMENTO

- Avvicinare il più possibile il sacco salma al corpo da recuperare e aprire completamente la cerniera.
- In base al carico applicato valutare quanti operatori sono necessari alla movimentazione della salma. Il sacco salma deve essere comunque sempre utilizzato da almeno due operatori adeguatamente formati.
- Attraverso le apposite maniglie procedere al trasporto della salma.

**La portata massima dei sacchi salma STX 700 e STX 702 è di 150 kg. Mentre i modelli STX 703 e STX 705 hanno una portata massima di 120 kg.**

### 4.4 TABELLA RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Il telo non sopporta il peso della salma	Telo danneggiato	Mettere immediatamente il dispositivo fuori servizio e contattare il Servizio Assistenza Clienti

## 5 | MANUTENZIONE E PULIZIA

### 5.1 PULIZIA

Per i modelli riutilizzabili STX 700 e STX 702 la pulizia può avvenire utilizzando detersivi delicati oppure acqua e sapone. In presenza di sangue, ossidarli prima di procedere al lavaggio con acqua.

### 5.2 MANUTENZIONE

#### 5.2.1 Manutenzione ordinaria

Per i modelli riutilizzabili STX 700 e STX 702 stabilire un programma di controlli periodici, effettuando le seguenti verifiche:

- Il sacco salma mostra sulla sua superficie tagli, fori, abrasioni?
- I componenti del dispositivo sono integri?
- Le maniglie sono lacerate?

Il dispositivo non richiede una revisione programmata.

#### 5.2.2 Manutenzione straordinaria

**La manutenzione straordinaria può essere eseguita solo dal Fabbricante o da centri autorizzati dal Fabbricante stesso.**

I modelli riutilizzabili STX 700 e STX 702, se utilizzati come riportato nelle seguenti istruzioni, hanno un tempo di vita di 3 anni.

**Avvertenza**

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso e non sono da intendersi come impegno da parte della Spencer Italia S.r.l. con riserva di modifiche. I prodotti Spencer vengono esportati in molti paesi nei quali non valgono sempre identiche regole. Per questa ragione possono esserci differenze fra quanto qui descritto ed i prodotti consegnati. Spencer lavora costantemente al perfezionamento di tutti i tipi e modelli dei prodotti venduti. Contiamo perciò sulla Vostra comprensione se dovessimo riservarci la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche alla fornitura nella forma, equipaggiamento, allestimento e tecnica rispetto a quanto qui convenuto.

© Copyright Spencer Italia S.r.l.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza previo consenso scritto della Spencer Italia S.r.l.